

 <p>Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Laboratuvarında Bulunan Prokan PE 6800 Hematogram Cihazı Cihazına Ait Kullanım Talimatı</p>	Döküman No:	SÜFAK.TL.0085
	Yayın Tarihi:	19.08.2019
	Revizyon Tarihi:	
	Revizyon No:	
	Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın Ç,alış,tırılması:

1. Örneklelerin Otomatik Aspirasyon Modunda Ç,alış,ılması

- 1.2. Automatic Start up iş,lemini baş,layabilmek için numeric klavyeden **“Start Up”** tus,una basılır.
- 1.3. Örnekleler kaset iç,erisine barkod etiketleri okunacak şekilde dikkatlice yerleş,tirilir.
- 1.4. Cihazın uygun test için ayarlanmış, olup olmadığı kontrol edilir.
- 1.5. Kaset/kasetler cihaza yerleş,tirildikten sonra cihaz otomatik olarak örneklelerin dođ,ngü,ye alınmasını baş,latır ve ç,alış,mayı bitirir.
- 1.6. Sistem uđ,zerinden kan örneklelerinin sonuc,ları gö,zlenir.

2. Manuel Aspirasyon Modunda

- 2.1. Cihaz kompresö,ru ve bilgisayarı aç,ılır. Numeric klavyeden **“Power On”** tus,una basarak cihaz aç,ılır.
- 2.2. Cihazın uygun test (kontrol ya da kan örneklelerine uygun modlar) için ayarlanmış, olup olmadığı kontrol edilir.
- 2.3. Örnekle ID (kan seri numarası veya dono,ru numarası) numeric ekran uđ,zerinden ID tus,una basılarak girilir ve **“Enter”** tus,una basılır.
- 2.4. Örnekle tü,pu’n kapag,ı c,ıkarılır, tü,pu iç,erisindeki örnekle aspirasyon ucuna yaklas,tırılıp cihazın örnekle otomatik olarak aspire etmesi sag,lanır.
- 2.5. Sinyal sesi duyulduğ,unda tü,pu aspirasyon ucundan uzaklas,tırılır ve prob temizleyicisi otomatik olarak temizleme iş,lemini baş,latır.
- 2.6. Sistem uđ,zerinden numunelerin sonuc,ları gö,zlenir.

3. Cihazın Kapatılması:

- 3.1. İş,lem bitince **“Log of”** iş,lemini gerç,ekleş,tirilip programdan ç,ıkma esnasında tüm aktif datalarkaydedilirvetümuygulamapencereleri kapatılır.
- 3.2. Cihazın numeric ekran uđ,zerinden **“Shutdown”** tus,una basılarak cihaz kapatılır.
- 3.3. **“Hutdown Computer”** mesajı gö,rüldüğ,ünde gu,venli bir şekilde bilgisayar, analizö,ru ve kompresö,ru kapatılır.

4. Cihazın Bakımı:

- 4.1. Cihaz dış, yüzeyi nemli bir bezle ilgili teknisyen tarafından silinir, proplar ve iç, hortumları clean solü,syonuyla teknik servis tarafından aylık temizlenir ve **“Cihaz Bakım Ç,izelgesi”**ne kaydedilir.
- 4.2. Cihazın yıllık genel bakımı tedarikç,i firma tarafından yapılır.

<p>HAZIRLAYAN/...../...../...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan MZA</p>
--	--