

Döküman No:	SÜFAK.TL.0085
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

## Kullanma Talimatı

### 1. Cihazın Çalıştırılması:

#### 1. Örneklerin Otomatik Aspirasyon Modunda Çalışılması

- 1.2. Automatic Start up işlemi baslatılabilmek için numeric klavyeden **“Start Up”** tusuna basılır.
- 1.3. Örnekler kaset içerisine barkod etiketleri okunacak şekilde dikkatlice yerleştirilir.
- 1.4. Cihazın uygun test için ayarlanmış olup olmadığını kontrol edilir.
- 1.5. Kaset/kasetler cihaza yerleştirildikten sonra cihaz otomatik olarak örneklerin döngüye alınmasını baslatır ve çalışmayı bitirir.
- 1.6. Sistem üzerinden kan örneklerinin sonuçları gözlenir.

### 2. Manuel Aspirasyon Modunda

- 2.1. Cihaz kompresörü ve bilgisayarı açılır. Numeric klavyeden **“Power On”** tusuna basarak cihaz açılır.
- 2.2. Cihazın uygun test (kontrol ya da kan örneklerine uygun modlar) için ayarlanmış olup olmadığını kontrol edilir.
- 2.3. Örnek ID (kan seri numarası veya donör numarası) numeric ekran üzerinden ID tusuna basılarak girilir ve **“Enter”** tusuna basılır.
- 2.4. Örnek tüpünün kapagı çıkarılır, tüp içerisindeki örnek aspirasyon ucuna yaklaştırılıp cihazın örneği otomatik olarak aspire etmesi sağlanır.
- 2.5. Sinyal sesi duyulduğunda tüp aspirasyon ucundan uzaklaştırılır ve prob temizleyicisi otomatik olarak temizleme işlemi baslatır.
- 2.6. Sistem üzerinden numunelerin sonuçları gözlenir.

### 3. Cihazın Kapatılması:

- 3.1. İşlem bitince **“Log of”** işlemi gerçekleştirilip programdan çıkma esnasında tüm aktif datalar kaydedilir ve tüm uygulamaların pencereleri kapatılır.
- 3.2. Cihazın numeric ekran üzerinden **“Shutdown”** tusuna basılarak cihaz kapatılır.
- 3.3. **“Shutdown Computer”** mesajı görüldüğünde güvenli bir şekilde bilgisayar, analizör ve kompresör kapatılır.



Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Laboratuvarında Bulunan Prokan PE 6800 Hematogram Cihazı  
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0085
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

#### 4. Cihazın Bakımı:

- 4.1. Cihaz dış, yüzeyi nemli bir bezle ilgili teknisyen tarafından silinir, proplar ve ic, hortumları clean solüsyonuyla teknik servis tarafından aylık temizlenir ve “**Cihaz Bakım C,izelgesi**”ne kaydedilir.
- 4.2. Cihazın yıllık genel bakımı tedarikçi firma tarafından yapılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA